

Produktinformation om Navina Smart

Produktbeskrivelse

Transanalt irrigationssystem med elektronisk kontrolenhed.

Holdbarhed og anvendelser

Alle komponenter i Navina-irrigationssystemet har en holdbarhed på 3,5 år, undtagen Navina-katetre og Navina-kateterstudser, som har 2 års holdbarhed. Når Navina-komponenter pakkes i sæt, er det komponenten med den korteste holdbarhed, der bestemmer sættets holdbarhed.

Bemærk, at Navina Smart-kontrolenheden også har en "seneste opladningsdato" på 1,5 år fra produktionsdatoen.

Navina-katetre og -kateterstudser er til engangsbrug, mens vandbeholderen kan bruges 15 gange, slangesættet kan bruges 100 gange, og Navina Smart-kontrolenheden 400 gangen eller i to år fra datoen for første anvendelse.

Materialesammensætning

Katetermateriale: Styren-ethylen-butylen-styren (SEBS)/polypropylen (PP) med en hydrofil polyvinylpyrrolidonbelægning (PVP).
Primært emballagemateriale: PE/PET-pose.
Sekundært emballagemateriale: Karton og bølgepap.

Tilsigtet anvendelse

Navina-systemerne er beregnet til transanal irrigation ved at tilføre vand til tyktarmens nederste del via et rektalkatetre.

Indikationer for brug

Navina-systemerne har til formål at hjælpe voksne og børn fra 3-års alderen, der lider af fækal inkontinens, kronisk forstoppelse og/eller tidskrævende tarmpleje. Vand, der tilføres tyktarmens nederste del, kan sætte gang i de peristaltiske muskler i tarmen, så de begynder at tømme indholdet fra den nederste del af tyktarmen og endetarmen.

Kontraindikationer

Brug IKKE Navina-systemer, hvis du har en eller flere af følgende lidelser:

- Kendt anal eller colorektal forsnævring
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom
- Akut divertikulitis
- Colorektal cancer
- Iskæmisk kolitis
- Inden for de seneste tre måneder har fået foretaget anal eller colorektal kirurgi.
- Du har fået foretaget endoskopisk polypektomi inden for de seneste 4 uger.

Da listen muligvis ikke er udtømmende, skal sundhedspersonalet også altid tage individuelle brugerfaktorer i betragtning.



Navina Smart System

| Reference | Type | Specifikation |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 6900911 | Navina Smart-system – Normal | 1 Navina Smart-kontrolenhed |
| 6901011 | Navina Smart-system – Lille | 1 strømadapter |
| 6901911 | Kateterstud til Navina Smart-system | 1 kabel |
| | | 1 vandbeholder |
| | | 1 vandslangesæt |
| | | 2 rektalkatetre |
| | | 1 Navina-taske |
| | | 1 tilbehørssæt |
| 6900310 | Navina-forbrugsvarer – Normal | 1 vandbeholder |
| 6900410 | Navina-forbrugsvarer – Lille | 15 rektalkatetre |
| 6901610 | Kateterstud til Navina-forbrugsvarer | |
| 6894010 | Navina-katetersæt – Normal | 10 rektalkatetre |
| 6894310 | Navina-katetersæt – Lille | |
| 6901110 | Navina-slangesæt | 1 kateterslange |
| | | 1 vandbeholder-slange |
| 6901200 | Tilbehør til Navina | 2 griberinge (1 lodret, 1 vandret) |
| | | 1 sikkerhedsbånd |
| | | 1 fikseringsbånd |
| | | 1 Navina Smart-fikserings-klemme |
| 6901411 | Navina Smart-kontrolenhed | 1 Navina Smart-kontrolenhed |
| | | 1 strømadapter |
| | | 1 kabel |
| 6901511 | Navina Smart-strømadapter og -kabel | 1 strømadapter |
| | | 1 kabel |

Navina™ Smart

