

Navina Smart Produktinformation

Navina™ Systems er udviklet til at hjælpe voksne og børn fra 3-årsalderen, der lider af fækal inkontinens, kronisk forstoppelse og/eller tidskrævende behandling af tarmen.

Brugeren kan sidde i kørestol og/ eller have nedsat motorisk håndfunktion.

Ved at tilføre vand til tyktarmens ned-erste del, kan peristaltikken stimuleres, så tyktarmen og endetarmen tømmes. Børn skal ledsages af en voksen omsorgsperson, indtil denne mener, at barnet selvstændigt er i stand til at varetage proceduren.

- Konsultér altid en professionel sundhedsfaglig person, der er specialiseret i brugen af TAI, inden Navina Systems tages i brug.
- Anvend kun Navina Systems til dets formål, som beskrevet i denne vejledning.
- Navina Systems er til énpatientsbrug og bør ikke deles med andre.
- Navina Regular katetret må kun anvendes af voksne patienter.
- Navina Small katetret må kun anvendes sammen med det helt hvide Navina System

Kontraindikationer

Du bør ikke anvende Navina™ Smart hvis du har én eller flere af følgende kontraindikationer:

- Kendt anal eller kolorektal forsnævring.
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom.
- Akut divertikulitis.
- Kolorektal cancer.
- Iskæmisk kolitis.
- Har fået foretaget et analt eller kolorektalt indgreb inden for de seneste 3 måneder.
- Har fået foretaget endoskopisk polypektomi inden for de seneste 4 uger.

Da listen med kontraindikationer ikke er fuldstændig, tager behandlerne også altid individuelle brugerfaktorer i betragtning.

Navina Smart Systems

Reference	Type	Specifikation
6900911	Navina Smart systemet Regular Kun til voksne	1 Navina Smart kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Vandslangesæt 2 Rektalkatetre Regular* 1 Navina taske 1 Tilbehørssæt
6901011	Navina Smart systemet Small Fra 3 år	1 Navina Smart kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Vandslangesæt 2 Rektalkatetre Small 1 Navina taske 1 Tilbehørssæt
6901911	Navina Smart systemet Cone Fra 3 år	1 Navina Smart kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Vandslangesæt 2 Cones 1 Navina taske 1 Tilbehørssæt

EN VELFUNKTERENDE MAVEN - ET GODT LIV

Wellspect®
A REAL DIFFERENCE



Navina Smart Systems forbrugsartikler

Reference	Type	Specifikation	Tekniske detaljer
6900310	Forbrugssæt Regular	1 Vandbeholder 15 Rektalkatetre Regular*	1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Hydrofile éngangskatetre
6900410	Forbrugssæt Small	1 Vandbeholder 15 Rektalkatetre Small	1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Hydrofile éngangskatetre
6901610	Forbrugssæt Cone	1 Vandbeholder 15 Cones	1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Hydrofile éngangscones
6894010	Rektalkatetersæt Regular*	10 Rektalkatetre	Hydrofile éngangskatetre
6894310	Rektalkatetersæt Small	10 Rektalkatetre	Hydrofile éngangskatetre
6901110	Slangesæt	1 Kateter- / coneslange 1 Vandbeholderslange	Kan anvendes 100 gange Kan anvendes 100 gange
6901200	Tilbehørssæt	2 Griberinge (1 lodret, 1 vandret) 1 Sikkerhedsbånd 1 Fikseringsbånd 1 Navina Smart fikseringsklemme	
6901411	Navina Smart kontrolenhed	1 Navina Smart kontrolenhed med oplader og ledning	Hastighed 100 - 650 ml/min (+/- 50 ml) Kan anvendes 400 gange

* Må kun anvendes til voksne

wellspect.dk

